

GHID DE RECOLTARE - MICROBIOM INTESTINAL

1. Verificați conținutul kit-ului de recoltare:

- 1 coprorecoltor simplu în recipient de transport (capac maro)
- 1 coprorecoltor cu mediu (**stabilizator**) în recipient de transport (capac alb)
- Dispozitiv autocolant pentru colectarea materiilor fecale



Atenție! Stabilizatorul este iritant! Nu vărsați! A se evita contactul cu tegumentele!

2. Recoltare (se va recolta obligatoriu în ambele coprorecoltoare):


a. COPRORECOLTOR SIMPLU

- Evitați contaminarea materiilor fecale cu urină
- Lipiți dispozitivul autocolant de recoltare în porțiunea posterioară a colacului, evitați contaminarea acestuia cu apă/urină
- Utilizați spatula din coprorecoltorul simplu pentru recoltarea materiilor fecale din 5 sau 6 puncte diferite (începutul, mijlocul, sfârșitul tranzitului intestinal)
- Umpleți coprorecoltorul până la semnul indicat (1/2 din tub)
- Închideți bine, notați numele și data recoltării



b. COPRORECOLTOR CU MEDIU

- Notați numele și data recoltării pe eticheta (existentă în kit) care se va lipi pe coprorecoltor (dop alb)
- Cu o mână fixați adaptorul albastru de tubul transparent, iar cu cealaltă mână deșurubați în sens opus acelor de ceasornic, dopul alb care conține spatula de recoltare (fig.1 +2)
- Introduceți spatula de recoltare în materiile fecale, în 3 locuri diferite. Asigurați-vă că doar partea crenelată a spatulei conține materii fecale
- Introduceți spatula cu materii fecale prin adaptorul albastru în tubul transparent (fig.3)
- Răsuciți dopul alb în sensul acelor de ceasornic, până se fixează în adaptorul albastru (fig.4). Această fixare previne vărsarea conținutului.

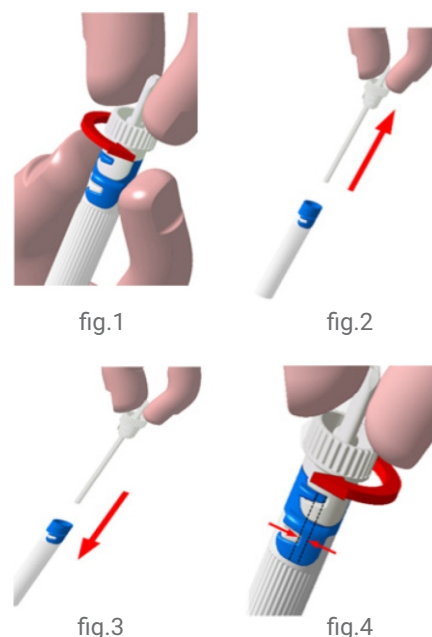

Păstrare probe: 1 zi la 2 - 8 grade C (nu se congelează)